

## 力斯顿品牌定制机防耳垢网罩定期清理、更换指导

### ● 网罩有什么用？


耳垢是定制机保养中的第一大敌。据估计，在定制机的硬性故障中80%与耳垢、耳油侵入并导致堵塞或损坏受话器有关；在所有返修的定制机中，超过一半的受话器会被耳垢损坏，而更换一次受话器的费用通常超过150元。所以只要做好耳垢的防护这一项日常维护，可以降低一半的定制机故障率及维修费。

防耳垢网罩是目前最先进的防耳垢装置之一，它能有效阻止耳垢进入助听器。最大可能使受话器不受损。


### ● 为什么要清理、更换网罩？

虽然防耳垢网罩可阻止耳垢进入助听器，但它并不能清除耳垢，耳垢会积聚在网格上，同时细小的网格也极易被损坏。此时不但网罩起不到保护作用，还会因堵塞导致助听器无声或声音轻。所以网罩的日常清理和定期更换非常重要。

我们建议用户每天用刷子清除网罩上的耳垢，每1-3个月更换一个新网罩（油性耳道需每个月更换）。

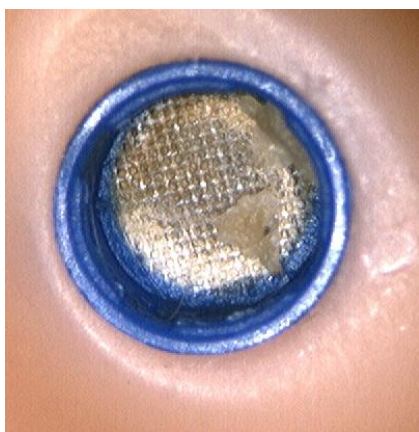

耳垢会积聚在网格上堵住出声孔

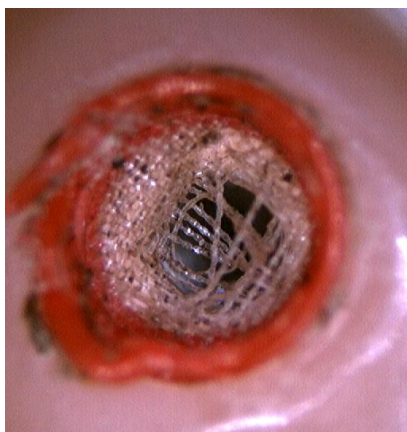


损坏的网罩不能起到保护作用


### ● 如何清理、更换网罩？

1. 网罩的日常清理：用户可以用包装内配置的专用刷子定期清洁网罩上的耳垢（注意：一定要**出声孔朝下**左右轻刷），避免耳垢堆积堵塞受话器口。不建议使用其它刷子清洁耳垢，刷子刷毛太细或太硬都会损伤网罩。

2. 网罩的更换如下：首先准备所需网罩（右耳用红色，左耳用蓝色）及专用工具（非专用工具可能会造成网罩容腔的损坏以致不能再安装网罩）。

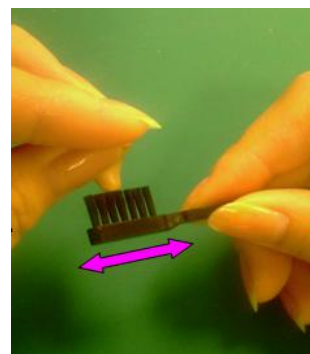


网罩的日常清理

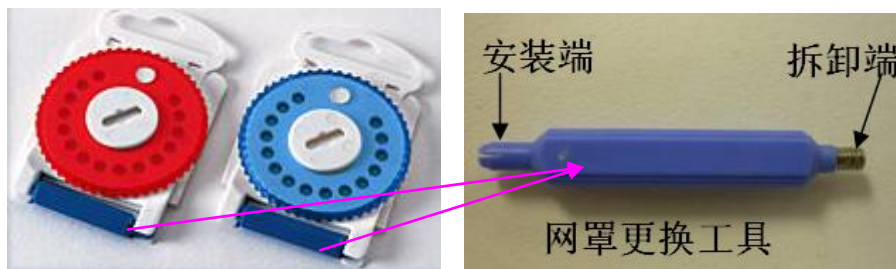


每盘含15个网罩及一个专用工具

专用工具两端作用的识别

- 拆卸已损坏或堵塞的旧网罩：将拆卸端的螺纹旋入网罩，然后向外拉，即可完成网罩的拆卸。
- 安装新网罩：使用安装端从转盘上取下一个网罩，然后塞入受话器出声口，然后左右轻轻摇晃取出工具即可完成网罩的安装。检查一下安装是否到位：网罩前端应与耳道基本保持平整。

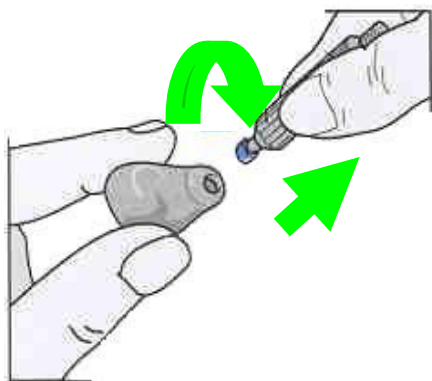

卸旧网罩

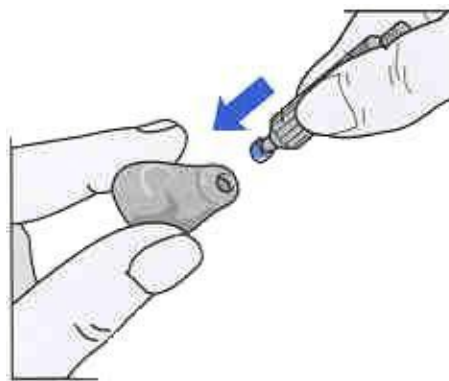

安装新网罩

## ● 友情提示

- 清理、更换网罩可最大程度降低定制机的故障率及维修费。
- 如果没有专用工具，请不要自行更换网罩。
- 公司的网罩有直径大小不同的两种，更换时请注意需使用同规格的网罩。

力斯顿品牌助听器管理中心

2013.6.25