

# iScan 6.0 软件安装及使用

版本：201606

## 目 录

1.	iScan 6.0 安装条件 .....	3
2.	iScan 6.0 安装步骤 .....	3
	附件：iScan 5.0 卸载方法 .....	10

## 1、iScan 6.0 安装条件

在进行安装 iScan 6.0 之前，一定要事先确认拟安装 iScan 6.0 的电脑是否符合安装条件。只有达到安装条件的电脑才能进行 iScan 6.0 安装和使用。

### iScan 6.0 安装条件：

#### 电脑硬件要求：

处理器： Quadcore, intel Core i5 或 i7；  
内存： 4GB； (最低要求： 2GB)  
显存（显卡内存）： 512MB； (最低要求： 256MB)  
自由硬盘空间： 10GB； (最低要求： 约 1GB)  
显示器： 分辨率最小 1024\*768 ；  
接口类型： USB2.0 或以上；  
其余均为当前的主流配置。

#### 电脑软件要求：

操作系统： Win 7 64 位旗舰版。

**注意：1、拟安装电脑中如以前安装有 iScan5.1 或以前版本，请在进行安装前，要进行完全卸载，然后再进行安装。**


**2、安装 iScan 的电脑上不能有摄像头，如有摄像头，iScan 将无法安装。**

## 2、iScan 6.0 安装步骤

**注意：在安装 iScan 6.0 软件前，请备份好重要文件和数据！（如：用户资料信息、财务数据等）**

**同时，确认 iScan 电源已关闭，USB 线未连接到 iScan !!!**

2.1、打开 iScan 6.0 安装软件，双击“setup.exe”文件。

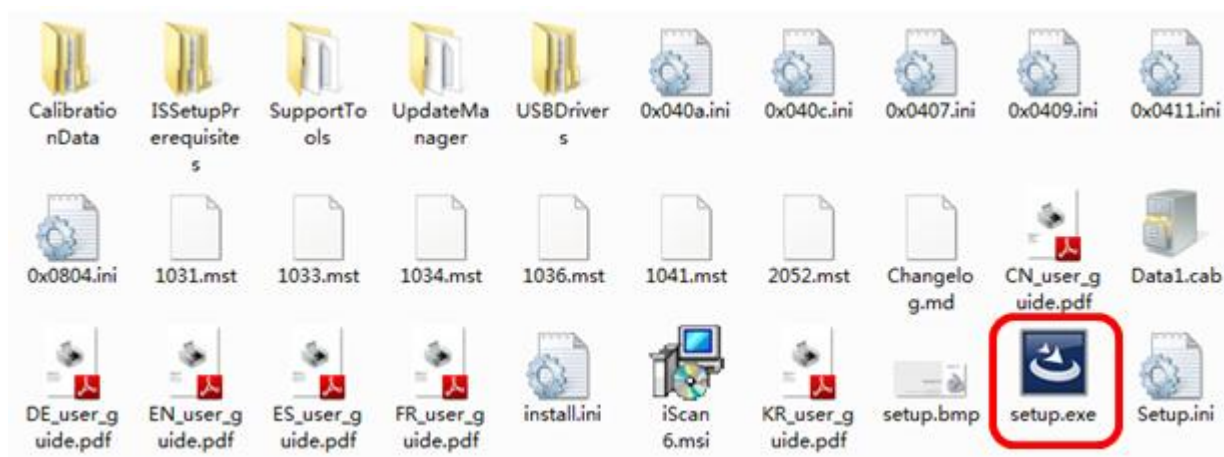

2.2、当出现如下选择安装语言界面时，请选择“中文（简体）”后，再按“确认”按钮。



2.3、在出现如下“许可证协议”对话框时，请选择两个条款都接受（在这两个条款前打上勾），再点击“下一步”。



2.4、出现如下对话框时，请点击“下一步”安装软件。



2.5、在出现“国家选择”对话框时，请选择“China”，再点击“下一步”。



2.6、在出现“目的地文件夹”对话框时，建议不要更改路径，直接点击“下一步”。



2.7、在出现“选择程序文件夹”对话框时，请不要更改，直接点击“下一步”。



2.8、在出现“启动自动更新”对话框时，请选择“不启用自动更新”，再点击“下一步”。



2.9、然后一直点击“下一步”，直至出现下面“InstallShield Wizard 完成”界面。此时软件的安装已完成，请点击“完成”。



2.10、重新启动电脑，让电脑自动更新电脑内部设置。

2.11、待电脑重新启动好后，将 iScan 电源及 USB 连接好，并打开电源。直到电脑右下方出现如下图所示的提示，此时，iScan 2 已处于可以使用状态。



您也可以通过下面的方式查看，iScan 是否已连接正常：

用鼠标右键点击“计算机”→“管理”→“设备管理器”；右侧界面中是否有“Point Grey Research Devices”，如有说明此次 iScan 已连接完成。



=====  
**重要事项：**

**需保存好 iScan 的原包装材料，以备以后 iScan 邮寄时使用。**

**在邮寄 iScan 时，必须使用原包装材料！！！！**

=====



技术支持电话：

iScan6.0 安装中，如有任何问题，请联系：

陈建东：

电话： 0512—67613201—3371


电子邮件： [jiandong.chen@siemens.com](mailto:jiandong.chen@siemens.com)

## 附件：iScan 5.0 卸载方法

a) 具体卸载方法如下：

i. 用鼠标左键点击“开始”，选择“控制面板”。如下图



ii. 在出现的界面中点击“ 程序和功能”图标。

iii. 再在出现的界面中用鼠标左键选中“iScan 5”的文件；



iv. 再点击“卸载”来进行卸载。

v. 卸载结束后，请到“C:\Program Files (x86)\SAT”文件夹中，将“iScan”文件夹删除掉。